

ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ РЕЗИНОВЫЙ ЭСМАРХА

ТУ 9398-002-00149535-2007

РУ № ФСР 2007/00032 от 27.05.2021г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха предназначен для временной остановки кровотечения, на надлежащем участке тела человека.

2. Эксплуатация

Перед применением жгут следует продезинфицировать двукратным протиранием салфеткой из бязи или марли, смоченной в 3%-ном растворе перекиси водорода (ГОСТ 177) с 0,5% моющего средства (по ГОСТ 25644), с интервалом между протиранием 10-15мин. Температура дезинфицирующего раствора должна быть не менее 18°C.

3. Хранение

Жгут следует хранить в помещении при температуре от 0 до плюс 25°C и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей, и других веществ, разрушающих резину.

4. Утилизация

Утилизация жгутов после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287-113.

5. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок годности жгутов – 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – один год со дня продажи в пределах гарантийного срока годности.