

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Кушетка медицинская смотровая (далее по тексту — кушетка) предназначена для размещения пациентов в смотровых, процедурных и других кабинетах.
- 1.2. Кушетки изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10° до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Основные параметры и размеры.
- 2.1.1. Габаритные размеры указаны в таблице Таблица 1.

Габаритные размеры, мм, ±10 мм	Значение
Длина	1940
Ширина	650
Высота	520

- 2.1.2. Масса не более 25 кг.
- 2.2. Характеристики:
 - 2.2.1. Кушетка выдерживает номинальную нагрузку не более 130 кг.
 - 2.2.2. Лежак кушетки состоит из двух секций — подголовника и ложе. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от 0 до 45 градусов.
 - 2.2.3. Подголовник и ложе изготовлены из ДСП, поролоновой прослойки и облицованы винилискожей по ТУ 8714-095-05790484, разрешенных к применению в изделиях медицинского назначения.
 - 2.2.4. Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм.
 - 2.2.5. Каркас кушетки имеет защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксиодно-полиэфирной «МЕДЛАК» ТУ2329-002-45318751-2008, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
 - 2.2.6. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.
 - 2.2.7. Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.
 - 2.2.8. Наружные поверхности кушетки устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.
 - 2.2.9. Средний срок службы кушетки до списания не менее 8 лет.
 За критерий предельного состояния кушеток принимается состояние, при котором восстановление работоспособности не целесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Комплект поставки изделия «Кушетка медицинская смотровая» КМС-01-«МСК»:
 - ложе - 1 шт. болт М10х45 - 6 шт.
 - стойка левая - 1 шт. шайба - 6 шт.
 - стойка правая - 1 шт.
 - стяжка - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Кушетка состоит из лежака, спинки (подголовника) и каркаса из рамки и стоек.
- 4.2. Каркас кушетки изготовлен из стальных труб квадратного сечения и полос.
- 4.3. Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно меняется от 0 до 45 градусов.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. К сборке и эксплуатации кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт, конструкцию изделия и правила его эксплуатации.

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 6.1. После транспортирования кушетки в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать ее в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 6.2. Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия.
- 6.3. Проверить комплектность.
- 6.4. Провести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

- 7.1. Перед сборкой необходимо выполнить все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.
- 7.2. Осуществить сборку согласно инструкции.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кушеток.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 9.1. Кушетки в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 100% при температуре 25°С.
- 9.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
- 10.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода кушетки в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.
- 10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка медицинская КМС — 1 — «МСК» (МСК-203) _____
 Дата выпуска _____ М. П.
 Соответствует техническим условиям ТУ 9452-002-52962725-2001

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники _____
 наименование и тип изделия

 номер ГОСТ или ТУ

 Номер и дата выпуска _____
 Приобретен _____
 дата, подпись, штамп торгующей организации

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
КУШЕТКИ МЕДИЦИНСКОЙ СМОТРОВОЙ
КМС — 01 — «МСК» (МСК — 203)

1. Соединить болтами раму и стойки, вставив упор в ушко на левой стойке. При этом ушко должно быть повернуто в сторону стойки.
2. Прикрепить болтами стяжку к стойкам

