

Бандаж компрессионный на голеностопный сустав БКГСС - «ТРИВЕС»

Модель: Т-8601

Описание:

- изготовлен из бандажной резины;
- снабжен контактной лентой (застежка «Велкро»).

Функции:

- легкая фиксация и компрессия голеностопного сустава.

Показания к применению:

- частичные повреждения связок голеностопного сустава;
- профилактика травм голеностопного сустава при занятиях спортом и интенсивных физических нагрузках;
- воспалительные заболевания сустава.

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- необходимость индивидуального ортезирования сустава;
- злокачественные новообразования в области использования бандажа;
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней;
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению: надевается на голеностопный сустав. Степень фиксации регулируется застежкой «Велкро» над лодыжкой.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- перед стиркой застегните все застежки;
- рекомендована ручная стирка при температуре 30°C, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- после стирки тщательно прополоскать бандаж;
- не тереть и не выжимать изделие;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Состав: латексная нить - 65%, полиэстер - 35%.



I S O 1 3 4 8 5 - 2 0 0 3



Дата выпуска

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп торг.
организации

СЕН 2018
ОТК
УЧАСТВУЮЩИЙ