

## Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

## Бандаж компрессионный на коленный сустав БККС - «ТРИВЕС»

### Модель: Т-8508 (с полицентрическими шарнирами)

#### Описание:

- разъемная конструкция наколенника позволяет максимально эффективно зафиксировать коленный сустав и надколенник при ограниченной подвижности сустава, избыточном весе и отеке сустава;
- снабжен 2-мя металлическими шарнирами, обеспечивающими правильную биомеханику коленного сустава;
- имеет вентиляционные отверстия в проекции подколенной ямки;
- усилен двумя лентами с застежками «Велкро» для надежной фиксации на конечности.

#### Функции:

- сильная фиксация коленного сустава и надколенника;
- боковая стабилизация и разгрузка коленного сустава;
- обеспечение термосберегающего и массажного эффектов.

#### Показания к применению:

- частичные повреждения боковых и крестообразных связок;
- реабилитация после травм и операций на коленном суставе;
- дегенеративно-дистрофические и воспалительные заболевания коленного сустава;
- остеохондропатии (болезнь Осгуда — Шлаттера);
- профилактика травм и заболеваний коленного сустава при повышенной физической нагрузке и занятиях спортом.

#### Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- необходимость индивидуального ортезирования сустава;
- злокачественные новообразования в области использования бандажа;
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней;
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие;
- тромбофлебит вен в области применения бандажа;
- гонартроз с вальгусной или варусной деформацией нижних конечностей.

**Применять изделие по назначению и под контролем врача.**

## Инструкция по применению:

- обернуть бандаж вокруг ноги, расположив коленную чашечку в отверстии;
- зафиксировать застежки «Велкро» на голени и бедре;
- шарниры должны располагаться по боковым поверхностям сустава;
- отрегулировать степень фиксации с помощью ремней на голени и бедре;
- степень фиксации и длительность ежедневного использования определяются врачом.

**При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

**Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

## Рекомендации по уходу:

- перед стиркой застегните все застежки и удалите шарниры из карманов;
- рекомендована ручная стирка при температуре 30° С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- после стирки тщательно прополоскать бандаж;
- не тереть и не выжимать изделие;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

**Состав:** неопрен - 65%, полиэстер - 35%, шарниры - алюминий.

<b>Размер изделия</b>	<b>1 (S)</b>	<b>2 (M)</b>	<b>3 (L)</b>	<b>4 (XL)</b>	<b>5 (XXL)</b>
<b>Окружность коленного сустава, см</b>	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55



 **ISCO**  
международный центр  
стандартизации и сертификации  
**ISO 13485-2003**



Дата выпуска  
Штамп ОТК **АПР 2018**

Дата продажи  
Штамп организации **ОТК**  
**Уд. Ковшик МЗ**