

## Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

## Бандаж компрессионный на коленный сустав БККС - «ТРИВЕС»

### Модель: Т-8520 (с силиконовым кольцом)

#### Описание:

- изготовлен по бесшовной технологии объемной вязки согласно анатомическим особенностям коленного сустава, оптимально облегает сустав, правильно распределяя давление;
- воздухо- и влагопроницаемая ткань обеспечивает дополнительный комфорт при длительном использовании;
- силиконовое кольцо овальной формы плотно охватывает коленную чашечку, стабилизируя коленный сустав;
- не ограничивает движения в суставе в физиологическом объеме, не скользит, устойчив к растяжению, долго сохраняет свою форму.

#### Функции:

- фиксация и компрессия коленного сустава;
- стабилизация надколенника;
- улучшение кровообращения, снижение отечности за счет компрессионного воздействия на область сустава.

#### Показания к применению:

- ушибы, частичные повреждения связок коленного сустава;
- воспалительные явления после травм и операций, внутри- и внесуставное скопление жидкости;
- хондромаляция надколенника;
- артрозы, артриты и остеоартриты коленного сустава.

#### Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- необходимость индивидуального ортезирования сустава;
- злокачественные новообразования в области использования бандажа;
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней;
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие;
- тромбоз вен в области применения бандажа.

**Применять изделие по назначению и под контролем врача.**

### **Инструкция по применению:**

- надевается непосредственно на тело;
- возьмите бандаж за верхний край и надевайте через стопу и голень на область коленного сустава;
- расположите бандаж так, чтобы коленная чашечка охватывалась силиконовым кольцом;
- режим использования определяется врачом.

**При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

**Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

### **Рекомендации по уходу:**

- рекомендована ручная стирка при температуре 30° С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- после стирки тщательно прополоскать бандаж;
- не тереть и не выжимать изделие;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

**Состав:** нейлон – 70%, спандекс – 30%, кольцо: силикон - 100% .

<b>Размер изделия</b>	<b>1(S)</b>	<b>2(M)</b>	<b>3(L)</b>	<b>4(XL)</b>	<b>5(XXL)</b>
<b>Окружность коленного сустава, см</b>	30-34	33-37	36-40	39-44	43-50