

**ПАСПОРТ**  
**Столик прикроватный**



Изготовитель: Caremax  
Rehabilitation Equipment Co., Ltd  
(Китай)

Модель: **СА 202**



**Технические характеристики:**

Длина – 62 см

Ширина – 42 см

Размер столешницы – 60x38, 20x38 см

Регулировка высоты – от 75,5 до 127 см

Грузоподъемность – до 15 кг

Вес – 9,2 кг

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию.

Конструкция столика рассчитана на его применение над кроватью. Нижняя часть основания заходит под кровать, а верхняя часть со столешницей располагается над лежащим на кровати. Столик регулируется по высоте. В основании столика предусмотрены колеса, обеспечивающие простоту его передвижения. Столешница допускает влажную дезинфекцию и местный нагрев.

**Гарантийные обязательства**

Гарантируется соответствие столика прикроватного требованиям нормативных документов (ГОСТ 16371-2014) при соблюдении условий транспортировки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 3 года.


**Сведения о сертификации**

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.АБ93.В.05219  
Срок действия с 09.10.2017г. по 08.10.2020г.

## Инструкция по сборке столика прикроватного СА 202

### Подготовка к эксплуатации

Перед распаковкой проверьте целостность упаковки. При обнаружении серьезных повреждений на упаковке, внимательно осмотрите изделие и при необходимости обратитесь к продавцу. После распаковки внимательно осмотрите изделие на наличие повреждений и неисправностей.

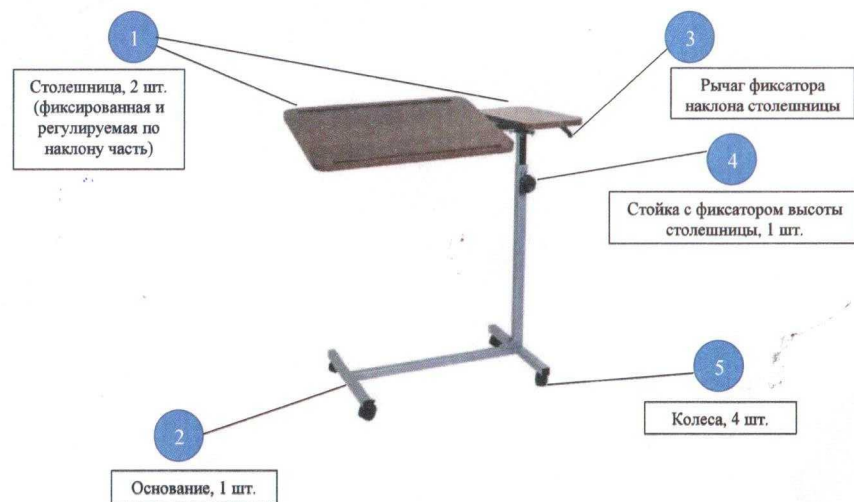

### Сборка

1. Вкрутите колеса (5) в основание столика (2) с помощью гаечного ключа. На болт колеса предварительно наденьте пружинную шайбу. (Рис. 1)  
Пропустите этот шаг, если столик поставляется с вкрученными колесами.



Рисунок 1

2. Соедините основание (2) на колесах и стойку (4). Вкрутите винты с шестигранным углублением. Предварительно наденьте на болты плоские шайбы и соединительные гайки.
3. Соедините столешницу (1) с основной конструкцией. Вкрутите шурупы с шестигранным углублением с помощью ключа.
4. Отрегулируйте высоту столешницы и зафиксируйте её с помощью фиксатора (рис. 2).



Рисунок 2

5. Отрегулируйте наклон столешницы при помощи фиксирующего рычага (3) (рис. 3)



Рисунок 3



**Столик прикроватный**  
Модель: CA202

Производитель: КареМакс Реабилитейшн Екьюпиент Ко. ЛТД  
(CareMax Rehabilitation Equipment Co. LTD)

Адрес производителя: 528251, Pingnan Industrial Region, Guicheng St., Nanhai area  
Foshan city, Guangdong, China (КИТАЙ)

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

Гарантийный срок хранения – 3 года.

Срок службы – 3 года.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.АБ93.В.05219,  
срок действия с 09.10.2017г. по 08.10.2020г.