

Инструкция по применению и хранению подушки кислородной "Meridian"

Назначение

Предназначена для доставки и подведения кислорода больному как в условиях стационара, так и в условиях выездной скорой помощи, а также в домашних условиях.

Общие указания

1. Наполнение подушек должен производить только обученный медицинский персонал в специально оборудованном помещении в следующей последовательности:

- установить зажим подушки в положение "открыто";
- расположить подушку перед редуктором баллона так, чтобы не было загибов на трубке;
- соединить трубку кислородной подушки с кислородным баллоном;
- наполнять подушку кислородом при давлении не более 10 кПа;
- установить зажим подушки в положение "закрыто", закрыть трубку заглушкой.

2. Перед подачей кислорода больному маску обработать тампоном, смоченным в 3% растворе перекиси водорода.

- соединить маску с трубкой подушки;
- приложить маску к лицу;
- установить зажим подушки в положение «открыто»;
- скорость поступления кислорода регулируется зажимом на трубке и надавливанием на подушку с ее угла;
- при использовании подушки соблюдать схему дыхания рекомендованную лечащим врачом;
- при неполном использовании кислорода установить зажим подушки в положение «закрыто», закрыть трубку заглушкой.

Меры безопасности

1. При наполнении подушки кислородом не допускается попадание масла на поверхность баллона и подушки, соприкасающейся с кислородом.

2. При заполнении подушки не превышать давление 10 кПа, это может привести к повреждению подушки.

3. Участок помещений, предназначенный для наполнения подушки кислородом должен быть изолирован от остальных помещений.

4. Длительное без перерывов пользование кислородными подушками может привести к нежелательным осложнениям.

Противопоказания

К оксигенотерапии существенных противопоказаний нет.

Кислородную подушку применяют после консультации с врачом.

Хранение

Рекомендуется заполнять подушку кислородом непосредственно перед применением. Кислород может храниться в подушке в течение 10 дней. Хранить в темном месте при температуре от 10 до 25° С и относительной влажности воздуха 65-80% в расправленном состоянии на расстоянии на менее 1 м от теплоизлучающих приборов. Защищать от воздействий прямых солнечных лучей. Не хранить в одном помещении с горючесмазочными веществами, кислотами, щелочами и другими веществами.

Комплектность

Подушка кислородная - 1 шт.

Маска для дыхания - 1 шт.

Зажим с колесиком - 1 шт.

Заглушка - 1 шт.

Инструкция по применению и хранению - 1 шт.

Пакет - 1 шт.

Дата изготовления - 05.2019

Срок годности - 3 года с даты изготовления.

Гарантийный срок - 1 год со дня продажи в пределах срока годности.



РУ № ФСЗ 2010/06465 от 20.07.2017