

Носилки мягкие
ТУ 9451-002-38140643-2012
Регистрационное удостоверение №РЗН 2013/1076 от 29.11.2021г.

ЭТИКЕТКА

1 Назначение и технические данные

- 1.1 Носилки мягкие (в дальнейшем – носилки) предназначены для переноски людей при аварийных ситуациях, когда обычными носилками воспользоваться неудобно или невозможно. В частности мягкие носилки могут использоваться при транспортировании людей по узким лестницам и извилистым проходам.
- 1.2 Основные размеры: длина 2100 ± 50 мм, ширина 850 ± 50 мм. Имеют четыре пары ручек.
- 1.3 Носилки выдерживают распределённый по площади груз массой 160 ± 5 кг.

2 Комплектность

- 2.1 В комплекты НМ-01, НМ-02 и НМ-03 входят: носилки мягкие – 1 шт, сумка-чехол, этикетка – 1 шт. По заказу покупателя носилки дополнительно комплектуются фиксирующими ремнями (исполнение НМ-02); фиксирующими ремнями и плечевыми ремнями для переноски пострадавшего в положении сидя (исполнение НМ-03).

3 Инструкция по эксплуатации, указание мер безопасности, дезинфекция


- 3.1 Уложить транспортируемого человека на носилки.
- 3.2 Два или четыре человека берутся за ручки носилок и транспортируют пациента на необходимое расстояние.
- 3.3 Носилки изготовлены из материалов безопасных при контакте с открытыми участками кожи транспортируемых людей.
- 3.4 Обеззараживание рабочей поверхности носилок производится 4% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства, типа «Лотос». Время дезинфицирующей выдержки – 60 минут. Обеззараживание производится из расчёта 700мл/ кв.м.
- 3.5 При видимых обильных загрязнениях носилок кровью - обеззараживание производится двукратным протиранием носилок двумя салфетками, смоченными дезинфицирующим раствором. После выдержки по п.3.4 дезинфицирующий раствор удаляется с поверхности носилок путём протирания салфеткой, смоченной водой. После чего носилки протираются сухой салфеткой.
- 3.6 Носилки могут подвергаться стирке в стиральной машине с использованием режимов стирки, определённых для синтетических тканей.

4 Срок эксплуатации

- 4.1 Средний срок службы носилок – 2 года.
- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации носилок -12 месяцев от даты продажи, но не более 18 месяцев от даты выпуска.
- 4.2 Гарантийный ремонт осуществляется при наличии этикетки.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485
Исполнения: НМ-01 НМ-02 (с фиксирующими ремнями) НМ-03 (с фиксирующими и плечевыми ремнями.)

Штамп ОТК

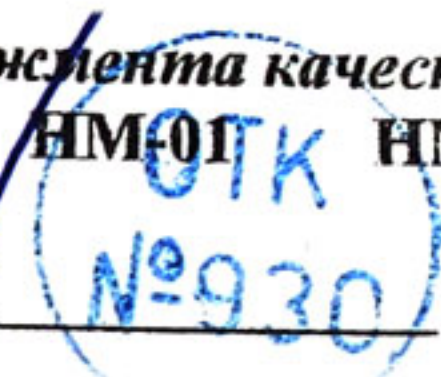

Дата выпуска: -- АПР 2023

Дата продажи: _____