



**АРМЕД®**

NON PROGREDI, EST REGREDI

# ПАСПОРТ

## И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

F15T8



F30T8



*Лампа ультрафиолетовая  
«Armed»*

*Перед эксплуатацией подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!*

## ОПИСАНИЕ

**Лампа ультрафиолетовая «Armed»: F15T8, F30T8** (далее по Руководству - лампа) предназначена для использования в установках, предназначенных для обеззараживания бактерий, вирусов и других простейших организмов.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не ронять лампы;
- Хранить в упаковке;
- Не разбивать.

При работе с лампой, находящейся в поле зрения, необходимо защищать глаза защитными очками и иметь в виду, что облучение лампой при отсутствии защитных средств может вызвать болезненный ожог кожи любого участка тела, лица, рук, а также слизистых оболочек глаз.

Замену ламп производить только на оборудовании, отключенном от питающей сети.

Эксплуатация ламп должна осуществляться строго в соответствии с требованиями, указанными в соответствующей нормативной документации.

В случае, если лампа была разбита, необходимо аккуратно собрать и удалить осколки лампы в пакет. Место, где разбилась лампа обработать 1% раствором перманганата калия и хорошо проветрить помещение. Пакет с разбитой лампой, а также лампы, вышедшие из строя, необходимо передать на утилизацию специализированным организациям.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** рекомендуется использовать резиновые перчатки в случаях, когда лампа была разбита.

## ВНИМАНИЕ



**Лампа содержит пары ртути. Запрещается выбрасывать вышедшие из строя лампы в мусорный контейнер, они подлежат сдаче в пункты их утилизации.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	F15T8	F30T8
Габаритная длина ( $\pm 5\%$ ), мм	452	908,8
Длина без выводов ( $\pm 5\%$ ), мм	436	893
Габаритная ширина ( $\pm 5\%$ ), мм	20	20
Мощность ( $\pm 5\%$ ), Вт	15	30
Номинальное напряжение ( $\pm 10\%$ ), В	55	96
Интенсивность бактерицидного потока ( $\pm 5\%$ ), Вт/м <sup>2</sup>	3,5	9,0
Масса (нетто/брутто) (1 шт./25 шт.) ( $\pm 5\%$ ), кг	0,067/2,1	0,123/4
Габариты транспортной упаковки (25 шт.) (ДхШхВ) ( $\pm 5\%$ ), мм	465x140x140	920x140x140

- Полезный срок службы - 8000 ( $\pm 5\%$ ) час.
- Спад бактерицидного потока после 5000 ( $\pm 5\%$ ) час. - 15%.

Тип цоколя - G13.

Длина волны - 253,7 Нм.

Лампа представляет собой двухцольную газоразрядную лампу низкого давления. Она состоит из трубчатого стеклянного корпуса с токоподводящими цоколями по краям

## ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Производите дезинфекцию ламп в соответствии с Руководством Р3.5.1904-04 МЗ РФ от 04.03.2004. Перед подключением предварительно проводят дезинфекцию наружных поверхностей ламп. Наружные поверхности ламп обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

### ВНИМАНИЕ



**Не проводите очистку наружных поверхностей ламп во время их работы и сразу после их отключения.**

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Лампы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Лампы транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 25834-83 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение ламп без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность ламп. Повреждения ламп, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

Ультрафиолетовая лампа содержит пары ртути. Запрещается выбрасывать вышедшие из строя лампы в мусорный контейнер, они подлежат сдаче в пункты их утилизации.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лампа \_\_\_\_\_ 25 шт.
2. Руководство \_\_\_\_\_ 1 экз.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции лампы, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

**Лампа ультрафиолетовая «Armed»: F15T8, F30T8** соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

**Изготовитель:** "Jiangyin Jianshifu Equipment Co.,Ltd.", No.48 Xiao Kan Road Shizhuang, LinGang new city, Jiangyin, Jiangsu, China, Китай

Жиангиин Жианшифу Эквипмент Ко., Лтд., №48 Ксиао Кан Род, Шижуанг, новый город ЛинГанг, Жиангиин, Джангсу