

ИНСТРУКЦИЯ

по применению аппликатора с пластмассовыми иглами

Назначение:

Аппликаторы с пластмассовыми иглами индивидуального пользования предназначены для снятия напряжения и болевых ощущений в мышцах после занятий спортом и других физических нагрузок, повышения и восстановления жизненного тонуса, работоспособности человека в условиях производства и быта, нормализации сна, улучшения настроения.

Основные технические характеристики:

Аппликатор представляет собой круглые изделия с иглами, которые изготовлены из нетоксичной пластмассы и закреплены на плотной гигиенически чистой основе-пленке из полиэтилена, тканого или нетканого полотна при помощи специальной кнопки.

Противопоказания к применению:

При возникновении сильных вегетативных реакций (учащение сердцебиения, слабость, головокружение и др.) процедуру прекратить, а время и интенсивность последующих процедур наращивать постепенно, контролируя при этом общее самочувствие, частоту пульса, артериальное давление. **ВНИМАНИЕ!** Аппликатор с пластмассовыми иглами предназначен для индивидуального пользования, поэтому запрещается использование аппликатора разными людьми.

Подготовка к работе изделия:

Готовые к применению аппликаторы упаковываются в гофроящики, полиэтиленовые пакеты с Инструкцией, в которой даны общие рекомендации. Перед началом использования необходимо ознакомиться с прилагаемой Инструкцией. Дезинфекцию следует осуществлять посредством обработки поверхности раствором моющих средств: мыльно-содовым раствором или 3% раствором перекиси водорода.

Порядок работы изделия:

Аппликатор следует накладывать на определенные проблемные зоны или мышцы, затем прижимать к поверхности кожи (в пределах болевой переносимости), после чего можно снимать. Процедуру повторять до ощущения тепла или жжения, что указывает на эффективность воздействия аппликатора.

При комфортном состоянии аппликатор можно носить длительное время, прижимая его подручными средствами (бинтом, полотенцем и т. д.).

Правила хранения и использование:

Аппликатор следует хранить в пакете при плюсовой температуре от 5° до 35° С. Не допускаются удары и механические воздействия на острие игл. При индивидуальном использовании не рекомендуется подвергать аппликатор тепловой обработке. Для удлинения срока службы достаточно его промыть и просушить в потоке теплого воздуха. Срок службы аппликатора не менее 2 лет.