

Uniel®

СВЕТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

WWW.UNIEL.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАМПА УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Производство сертифицировано по стандарту ISO9001:2008.

Производство соответствует требованиям европейского сертификата CE и требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Ультрафиолетовая бактерицидная лампа может быть использована только в специальном излучателе!

Внимательно прочтите инструкцию!

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь со специалистом!

НАЗНАЧЕНИЕ

Ультрафиолетовая бактерицидная лампа Uniel в составе специального излучателя применяется только для дезинфекции (обеззараживания) помещений, жидкостей и других медицинских целей. Может также использоваться в промышленных целях, в системах кондиционирования, вентиляции и водоснабжения.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ультрафиолетовая бактерицидная лампа Uniel является источником ультрафиолетового излучения с длиной волны в диапазоне UVC с пиком в 253,7 нм.

3. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети.

Установка и замена лампы должна производиться только при отключенном питании электросети, при установке лампу необходимо держать за пластиковое основание корпуса.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Ультрафиолетовую бактерицидную лампу разрешается использовать только специалистами или по рекомендации специалистов.

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь со специалистом!

Запрещается, во время дезинфекции помещения находиться в нем людям, животным и растениям. Необходимо после каждой дезинфекции проветривать помещение не менее 15 минут.

Некоторые виды ламп при работе выделяют озон (O₃), это токсичный газ, он может вызвать отравление при вдыхании.

Во время работы запрещается смотреть на лампу без защиты глаз специальными очками с УФ-фильтром.

Запрещается прикасаться к работающей лампе любыми предметами или руками.

Не допускается длительное прямое воздействие УФ-излучения лампы на кожу человека или животных. Длительное воздействие может вызвать или спровоцировать доброкачественные и/или злокачественные новообразования. А также может вызвать расстройства зрения и другие заболевания.

Противопоказания при применении в медицинских целях.
Противопоказаниями для местных и общих УФ-облучений

являются злокачественные новообразования, системные заболевания соединительной ткани, активная форма туберкулеза, гипертиреоз, лихорадочные состояния, склонность к кровотечениям, недостаточность кровообращения II и III степеней, артериальная гипертензия III степени, выраженный атеросклероз, заболевания почек и печени с недостаточностью их функций, кахексия, малярия, повышенная чувствительность к УФ-лучам, фотодерматозы, инфаркт миокарда (первые 2-3 недели), острое нарушение мозгового кровообращения.

Ультрафиолетовую бактерицидную лампу запрещено использовать при видимых повреждениях корпуса или колбы.

Ультрафиолетовую бактерицидную лампу запрещено использовать при (или после) ее контакта с водой или другими жидкостями.

Ультрафиолетовую бактерицидную лампу запрещено использовать в цепях с датчиками, в цепях с регуляторами напряжения (диммерами).

Не разбирать.

Если во время работы лампа выключилась, пожалуйста, проверьте:

-надежно ли лампа установлена в патроне;

-есть ли напряжение сети;

-не повреждены ли электрические части и кабели.

Если все вышеперечисленное находится в рабочем состоянии, повторно включите светильник. Если лампа не заработала, она должна быть заменена.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

ВНИМАНИЕ!

Гарантия действует в течение 12 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

Замена вышедших из строя ламп осуществляется в точке продажи.

Гарантийные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений. Такие лампы подлежат замене.

Замена предполагает тестирование лампы.

Условия гарантии не распространяются на лампы, приобретенные с целью использования в предпринимательской деятельности.

Гарантийные обязательства не распространяются:

На покупателей (юридических и физических лиц), действующих по поручению и в интересах юридических лиц, осуществляющих покупку ламп UNIEL. В этом случае гарантийные обязательства оформляются отдельным приложением к договору поставки по согласованию с уполномоченным представителем компании UNIEL.

На изделия, имеющие видимые физические повреждения их составных частей (колбы, корпуса, цоколя, а также индивидуальной упаковки).

На изделия, вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.

На изделия, вышедшие из строя в результате попадания