



## Костыли локтевые

10072, 10074, 10075, 10076, 10079, 10081



## Насадки для костылей

Резиновая насадка для костылей:

10030, 10031

Руководство по эксплуатации

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |   |
|--|---|
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....                     | 3 |
| 1.1 Назначение.....                          | 3 |
| 1.2 Технические характеристики.....          | 3 |
| 1.3 Упаковка.....                            | 4 |
| 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....          | 4 |
| 2.1 Важные предупреждения.....               | 4 |
| 2.2 Порядок работы.....                      | 4 |
| 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....             | 4 |
| 4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....                      | 5 |
| Приложение 1. Декларация о соответствии..... | 7 |

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик костылей локтевых 10072, 10074, 10075, 10076, 10079, 10081.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

## 1. описание и работа

### 1.1 Назначение

Предназначен для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние конечности.

### 1.2 Технические характеристики

| Характеристика   | Описание                                 | Артикул                        |
|------------------|--|--------------------------------|
| материал         | алюминий                                 | все модели                     |
| рукоятка         | пластиковая                              | 10072, 10074,<br>10075, 10076, |
|                  | пластиковая со<br>светоотражае-<br>телем | 10079                          |
|                  | пластиковая ана-<br>томическая           | 10081                          |
| локтевая манжета | виниловая откид-<br>ная                  | 10072                          |
|                  | виниловая ре-<br>гулируемая по<br>высоте | 10074, 10075,<br>10076, 10081  |
|                  | пластиковая фик-<br>сированная           | 10079                          |

|              |                         |            |
|--------------|-------------------------|------------|
| особенность  | пирамидальная<br>основа | 10072      |
|              |                         |            |
| производство | Тайвань (Китай)         | все модели |
| гарантия     | 6 месяцев               | все модели |

### 1.3 Упаковка

Комплектация: костыль, руководство по эксплуатации

## 2. использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.
- Максимальная нагрузка на костыли 10072, 10079, 10081 - 100 кг; на оставшиеся модели - 125 кг

### 2.2 Порядок работы

1. Костыли продаются в собранном виде.
2. При регулировании высоты костыля убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия. Модели 10074/U, 10075/U, 10076/U, 10079/SL/U - со встроенным УПС.

## 3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

#### 4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати, штамп

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

---

Костыли локтевые 10072, 10074, 10075, 10076, 10079, 10081

Производитель: Valentine International ltd, Китай.



|                |  |
|----------------|--|
| Серийный номер |  |
| Дата продажи   |  |

Подпись продавца \_\_\_\_\_

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

# Приложение 1

1

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «СИМС-2»

(Наименование организации-изготовителя, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

**Межрайонная инспекция ФНС № 46 по Москве**

**Основной государственный регистрационный номер 1027739438902 от 02.05.2012**

(Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя: наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)  
**ИНН 7734197385**

**125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 6**

**тел. (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, info@sims2.ru**

(адрес, телефон, факс)

в лице

**Генерального директора Бадаляна Саргиса Павели**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что

1. Костыли подмышечные: АРТ. 10021, АРТ. 10021/СН, АРТ. 10021/Р, АРТ. 10021/У, АРТ. 10022, АРТ. 10022/У, АРТ. 10022-ВА, АРТ. 10023, АРТ. 10023/У, АРТ. 10023-ВА;
2. Костыли локтевые: АРТ. 10071, АРТ. 10072, АРТ. 10073, АРТ. 10074, АРТ. 10074/У, АРТ. 10075, АРТ. 10075/У, АРТ. 10076, АРТ. 10076/У, АРТ. 10079, АРТ. 10079/У, АРТ. 10081;
3. Принадлежности к костылям: АРТ. 10050 - Резиновые подмышечные валики 19 см., АРТ. 10060 - Резиновые валики для кисти 10 см., АРТ. 10030 - Резиновая насадка для костылей, АРТ. 10031 - Резиновая насадка для костылей, АРТ. 10032 - Резиновая насадка для костылей, АРТ. 10033 - Резиновая насадка для костылей.

**Изготовитель продукции:** VALENTINE INTERNATIONAL LTD (ВАЛЕНТАЙН ИНТЕРНЕЙШИЛ ЛТД),

8TH FLOOR, NO 149, SEC. 2, TA TUNG RD. 221, HSICHIN CITY, TAIPEI HSIEN, Тайвань (Китай), заводы:

- ZHONGSHAN GENTRY HARDWARE PRODUCTS CO. LTD., №152 WU FU ROAD, HSEIN YIN INDUSTRIAL AREA, TAINAN HSIEN, CHINA (КИТАЙ)

- ST. YORK ENTERPRISE CO., LTD., №12, LANE 300, GUANGDE RD, TAIPING CITY, TAICHUNG COUNTRY, TAIWAN, CHINA (КИТАЙ)

- FOSHAN NANHAI R. POON MEDICAL PRODUCTS CO. LTD, NEW CITY DISTRICT. DANZAO, NANHAI, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA (КИТАЙ)

**Код ОК 005 (ОКП) 93 9670 Код ТН ВЭД СНГ 9021 10 10 00**

(Наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ)

**Серийный выпуск**

(Сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора, накладная, наименование изготовителя и т.п.))

**ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010, ГОСТ Р 51632-2000,**

соответствует требованиям **ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011,**

**ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011**

(Обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией с указанием пунктов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании

**протоколов испытаний: №№ 1688.014, 1687.014 от 19.05.2014 ИЛ ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России (№ РОСС RU.0001.21ИМ33);**

**№№ 1128/14, 1129/14 от 16.05.2014 ИЦП ООО "ПСА" (РОСС RU.0001.21ИМ54)**

**регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2011/09872 от 21.06.2011**

(Информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации **16.05.2014** Декларация о соответствии действительна до **15.05.2019**



м.п.

(Подпись)

**С.П.Бадалян**

(Инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро- машиностроительной продукции» (ООО «ЭЛМАШ»)**

**Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ77.**

**141400 ХИМКИ Московской области, ул. Ленинградская, 29**

**Тел. (495)7812587, факс (495)7812588, e-mail: oc@anogemc.ru**

(Наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

**№ РОСС ТW.МЕ77.Д00350 от 16.05.2014**

(Дата регистрации и регистрационный номер декларации)



м.п.

(Подпись)

**Д.А.Дружинин**

(Инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

Для заметок