RU

Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях тела при проведении манипуляций.

Общая информация

- Изготовлен из мягкой прорезиненной ленты.
- Длина ленты в свободном состоянии 45 ±2 см.
- Ширина ленты 2.5 см.
- Простое обслуживание одной рукой.

Предупреждения

- Нестерильный.
- Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.
- Хранить при температуре от -30 до +45 °C, беречь от влаги и прямых солнечных лучей.
- Утилизация жгута венозного в установленном порядке (биологически опасные отходы).
- Конструкция жгута рассчитана на усилие, достаточное только для ограничения циркуляции венозной крови.
- Допускается обработка любыми разрешенными дезсредствами.

Порядок работы

- 1. Оберните жгут вокруг конечности, не допуская перекручивания ленты, и вставьте защелку в корпус замка.
- 2. Потяните за свободный конец жгута для ограничения циркуляции венозной крови.

Внимание! Пульс на периферических артериях должен сохраняться.

3. После проведения манипуляций для освобождения ленты нажмите на кнопку и расстегните замок.

Инструкция по применению

APEXMED

Жгут для внутривенных манипуляций

Reusable IV tourniquet




Amsterdam, the Netherlands.Made in China (Сделано в Китае).

REF 0506-00-01 LOT 2173303 2022-02 2027-01



Рисунок 1. Компоненты

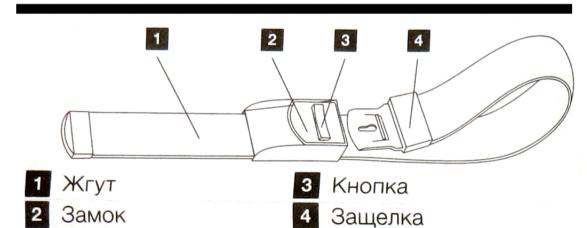

Символы

ř.				
	REF	Номер по каталогу	Ť	Беречь от влаги
	LOT	Код партии	-30+45 °C	Температурный диапазон
		Дата изготовления	I	Хрупкое, обращаться осторожно
	\square	Использовать до	NON TOXIC	Не токсично
,	LATEX	Содержит натуральный латекс	*	Не допускать воздействия солнечного света
	W	Апирогенно		Обратитесь к инструкции



Утилизация по установленным правилам

по применению