

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Срок хранения – 3 года.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС СN.ИМ25.Д05064

Срок действия с 24.05.2011г. по 24.05.2014г.

Регистрационное удостоверение №2006/2501

Срок действия с 28.12.2006г. по 28.12.2016г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Инвалидная кресло-коляска

ПАСПОРТ

Производитель: Чжаокинг Дингху Медикал Эквипмент Фэктори (КНР)
Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: LK 6118-51 (56, 56A)



Основные технические характеристики:

	LK6118-51	LK6118-56	LK6118-56A
Ширина сидения, мм	510	560	610
Ширина в рабочем состоянии, мм	720	770	820
Диаметр заднего колеса, мм	630	630	630
Диаметр переднего колеса, мм	200	200	200
Высота сидения, мм	520	520	520
Высота от пола до спинки, мм	910	910	910
Масса, кг	25,8	26,2	26,4
Грузоподъёмность, кг	160	180	205

Комплект поставки

1. Кресло-коляска - 1 шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт.
3. Набор ключей

Кресла-коляски инвалидные складные предназначены для передвижения больных и инвалидов с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твёрдым покрытием для преодоления незначительных расстояний. Рама изделия выполнена из стали с хромовым покрытием, которое защищает от коррозии и облегчает санитарную обработку. Подлокотники съёмные, что делает удобным посадку и высадку инвалида.

Меры безопасности

- при посадке пользователя в кресло-коляску и высадке из неё колеса должны быть поставлены на тормоза
- категорически запрещается вставать на подножки
- запрещена эксплуатация изделия с неисправными тормозами

Внимание! Перед эксплуатацией кресла-коляски необходимо проверить надежность крепления деталей.

Подготовка кресла-коляски к эксплуатации

Складывание и раскладывание

Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента. Сложить кресло-коляску можно, потянув сидение вверх. Раскладывание производится в обратной последовательности. При этом нажимают на боковые элементы конструкции, где крепится сидение, вниз от себя до полного раскладывания.

Опоры для ног

Модель комплектуется съёмными, регулируемыми по высоте (вдоль оси) подножками. Для установки опор на кресло-коляску необходимо надеть опору на направляющие, находящиеся на раме и повернуть в сторону от колеса до срабатывания фиксатора.

Тормоза

Кресло-коляска снабжена слева и справа рычагами стояночного тормоза, перемещением рычага можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования.

Колеса

Модель комплектуется резиновыми цельнолитыми шинами.

Обслуживание и уход при эксплуатации

При эксплуатации кресло-коляска требует определённого технического ухода. Обивку из искусственной кожи необходимо чистить тёплой водой с применением мягких моющих средств.

При необходимости сидение, спинку и подлокотники следует протирать (дезинфицировать) влажной тряпкой, смоченной в 0,5 - 1,0% растворе хлорамина. Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом. Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твёрдыми и острыми предметами.