

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
РУЧКИ ДЛЯ СКАРИФИКАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ
«САТЕЛЛИТ»**

Сателлит®



Ручка для скарификатора автоматическая «Сателлит» (далее – ручка) предназначена для индивидуального применения скарификаторов при взятии пробы крови из пальца.


Скарификатор для взятия пробы крови фиксируется в ручке и подается для прокола подушечки пальца путем нажатия на кнопку.

ВНИМАНИЕ!

Ручка и скарификаторы предназначены только для индивидуального применения.

Скарификаторы приобретаются пользователем самостоятельно. Диаметр установочного отверстия для скарификатора – 5 мм.

Рекомендуется использовать универсальные скарификаторы с защитным диском.

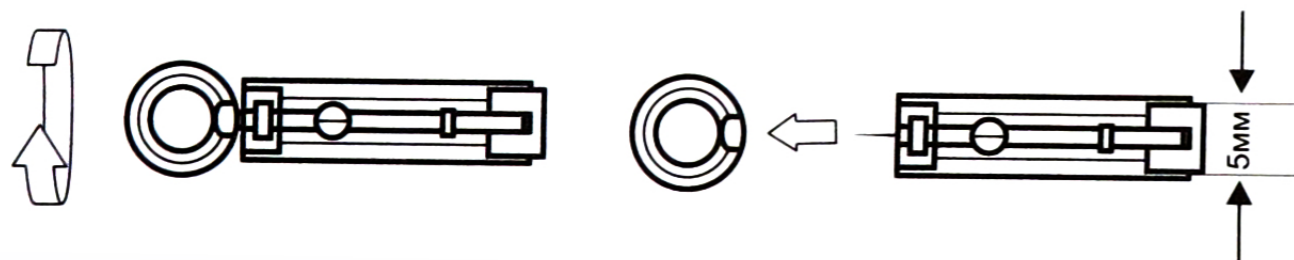

Условия хранения

Храните ручку при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80 %.

Условия применения


Используйте ручку и скарификаторы при температуре от +20 до +24 °С.

Дезинфекция

Наружную поверхность ручки рекомендуется протирать спиртом 70 % или мыльным раствором. Для более тщательной обработки отвинтите наконечник, вымойте его в теплой воде и просушите.


Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации ручки – 1 год.

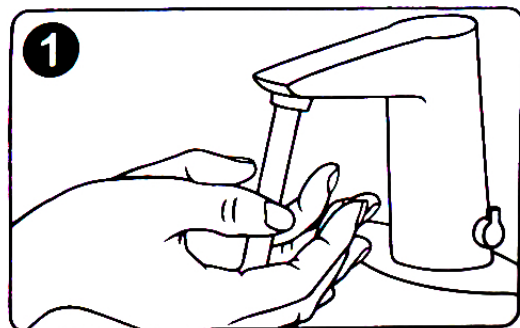


Правила использования

1. Вымойте руки с мылом и просушите. В случае использования спиртосодержащего тампона (салфетки) просушите подушечку пальца.

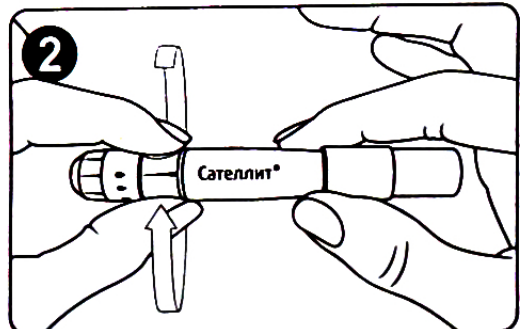


2-3. Удерживайте ручку за углубление для пальцев, отвинтите наконечник ручки.

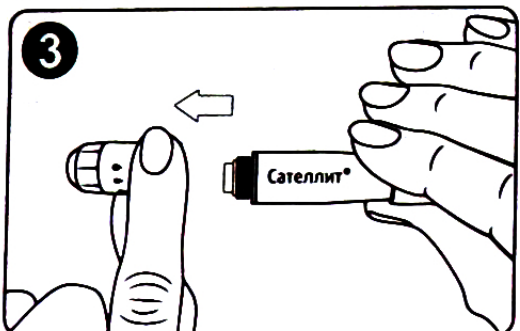

4-5. Вставьте скарификатор в гнездо ручки, удалите защитный колпачок со скарификатора, удерживая его пальцами.

6. Привинтите наконечник ручки.

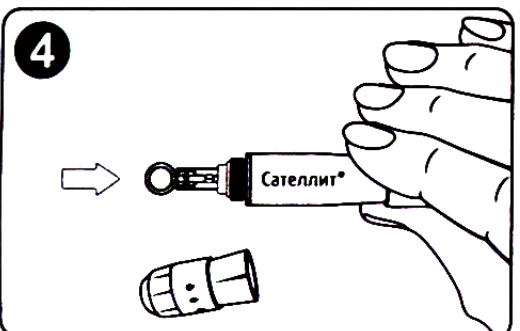

7. Установите глубину прокола, совмещая размер капли со стрелкой на наконечнике ручки.

8. Приставьте отверстие наконечника ручки к месту прокола пальца и нажмите на кнопку.

9. После использования отвинтите наконечник ручки, удерживая его за углубление для пальцев, извлеките и утилизируйте использованный скарификатор, надев защитный колпачок.

