

**1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

- 1.1. Кушетка физиотерапевтическая (далее по тексту — кушетка) предназначена для проведения физиотерапевтических процедур в отделениях больниц, поликлиник, ЛПУ.  
1.2. Кушетки изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 2.1. Основные параметры и размеры.  
2.1.1. Габаритные размеры МД-600 (1950х650х535) мм, ±10 мм.  
МД-601 (1950х 900х535)мм, ±10 мм.  
2.1.2. Масса не более 25 кг.  
2.2. Характеристики:  
2.2.1. Кушетки выдерживают равномерно распределенную по ложу нагрузку массой не более 130 кг.  
2.2.2. Кушетки состоят из двух секций — подголовника и ложа. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от 0 до 45 градусов.  
2.2.3. Подголовник и ложе изготовлены из ДСП, поролоновой прослойки и облицованы винилскожей по ТУ 8714-095-05790484, разрешенной к применению в изделиях медицинского назначения.  
2.2.4. Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм.  
2.2.5. Каркас кушетки имеет защитно-декоративное покрытие лаком ПУ-060, нетоксичным, устойчивым к средствам дезинфекционной обработки способом протирания.  
2.2.6. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.  
2.2.7. Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.  
2.2.8. Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.  
2.2.9. Средний срок службы кушеток до списания не менее 6 лет.  
За критерий предельного состояния кушеток принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- 3.1. Комплект поставки изделия:  
Каркас с лежаком и подголовником в сборе — 1 шт.  
Ножка — 4 шт.  
Поперечная царга — 2 шт.  
Болт мебельный М8х70 ГОСТ 7801 — 16 шт.  
Шайба 8 плоская ГОСТ 11371 — 16 шт.  
Гайка М8 ГОСТ 5915 — 16 шт.  
Уголок — 8 шт.  
Саморез 5х20 — 16 шт.

**4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

- 4.1. Кушетки состоят из каркаса, ножек, ложа и подголовника.  
4.2. Каркас кушетки изготовлен из деревянных брусков прямоугольного и квадратного сечения.  
4.3. Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от 0 до 45 градусов.

**5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

- 5.1. К сборке и эксплуатации кушеток допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию изделия и правила эксплуатации.

**6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

- 6.1. После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.  
6.2. Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия.  
6.3. Проверить комплектность.  
6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

**7. ПОРЯДОК СБОРКИ**

- 7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.  
7.2. Осуществить сборку согласно инструкции.

**8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- 8.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности крепления узлов кушетки.  
8.2. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их гаечным ключом.

**9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

- 9.1. Кушетки в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.  
9.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

**10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.  
10.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода кушетки в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.  
10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

**11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Кушетка физиотерапевтическая КФ600 - «МСК», КФ601 - «МСК» \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ М.П.

Соответствует ТУ 9452-028-52962725-2009 и признана годной к эксплуатации.

Подписи лиц, ответственных за приемку.

**12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники \_\_\_\_\_

Номер ГОСТ или ТУ \_\_\_\_\_

Номер и дата выпуска \_\_\_\_\_

Приобретено \_\_\_\_\_

дата, подпись, штамп торгующей организации

## Инструкция по сборке кушетки КФ - «МСК»

1. Собрать ножки попарно с поперечной царгой при помощи мебельных болтов М8х70 и гаек М8. Под гайку подложить шайбу 8.
2. Ножки в сборе с царгой прикрепить к каркасу при помощи мебельных болтов М8х70 и гаек М8. Под гайку подложить шайбу 8.
3. Затянуть резьбовые соединения гаечным ключом.
4. Установить уголки между ножкой и каркасом, ножкой и царгой при помощи самореза 5х20.

