

Гарантия — из латуни 1 год, из нержавеющей стали — 2,5 года

**НАБОР РАСШИРИТЕЛЕЙ
КАНАЛА ШЕЙКИ МАТКИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ
№№ 3-14-«М-МИЗ»**

**ЭТИКЕТКА
НАЗНАЧЕНИЕ**

Расширители применяются при операциях выскабливания полости матки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|---------|
| 1. Расширитель канала шейки матки № 3 | - 1 шт. |
| 2. Расширитель канала шейки матки № 3, 5 | - 1 шт. |
| 3. Расширитель канала шейки матки № 4 | - 1 шт. |
| 4. Расширитель канала шейки матки № 4, 5 | - 1 шт. |
| 5. Расширитель канала шейки матки № 5 | - 1 шт. |
| 6. Расширитель канала шейки матки № 5, 5 | - 1 шт. |
| 7. Расширитель канала шейки матки № 6 | - 1 шт. |
| 8. Расширитель канала шейки матки № 6, 5 | - 1 шт. |
| 9. Расширитель канала шейки матки № 7 | - 1 шт. |
| 10. Расширитель канала шейки матки № 7, 5 | - 1 шт. |
| 11. Расширитель канала шейки матки № 8 | - 1 шт. |
| 12. Расширитель канала шейки матки № 8, 5 | - 1 шт. |
| 13. Расширитель канала шейки матки № 9 | - 1 шт. |
| 14. Расширитель канала шейки матки № 9, 5 | - 1 шт. |
| 15. Расширитель канала шейки матки № 10 | - 1 шт. |
| 16. Расширитель канала шейки матки № 10, 5 | - 1 шт. |
| 17. Расширитель канала шейки матки № 11 | - 1 шт. |
| 18. Расширитель канала шейки матки № 11, 5 | - 1 шт. |
| 19. Расширитель канала шейки матки № 12 | - 1 шт. |
| 20. Расширитель канала шейки матки № 12, 5 | - 1 шт. |
| 21. Расширитель канала шейки матки № 13 | - 1 шт. |
| 22. Расширитель канала шейки матки № 14 | - 1 шт. |

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

23. Этикетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина расширителей - 190 мм

Диаметр в мм - соответствует номерам расширителей

Расширители изготовлены из нержавеющей стали и латуни с никелевым гальванопокрытием.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Расширители устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре $(120 \pm 3)^\circ\text{C}$ в течение $(45 + 5)$ мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 см^3 воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре $(180 \pm 2_{10})^\circ\text{C}$ в течение $(60 + 5)$ мин.

ХРАНЕНИЕ

Храниться расширители должны при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C . Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Расширители соответствуют требованиям технической документации и признаны годными для эксплуатации.
Контролер ОТК № 1 Упаковщик № 1 Дата выпуска

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора расширителей требованиям технических условий ТУ 9437-093-07613473-2003 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящей этикетки.

Гарантийный срок эксплуатации набора расширителей - 1 год со дня изготовления.