

# БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ БКЛЗС – «ТРИВЕС»

Модель: Т-8301

## Особенности:

- изготовлен из воздухопроницаемого эластичного неопрена
- снабжен контактной лентой (застежка «Велкро»)
- универсальный: для левой и правой руки

## Функции:

- умеренная фиксация и компрессия лучезапястного сустава
- легкая фиксация 1-го пальца и 1-го пястно-фалангового сустава
- микромассажное и тепловое действия

## Назначение:

- частичные повреждения связок и ушибы лучезапястного сустава
- профилактика травм лучезапястного сустава при занятиях спортом и интенсивных физических нагрузках
- воспалительные заболевания сустава

## Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- необходимость индивидуального ортезирования сустава
- злокачественные новообразования в области использования бандажа
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие

**Применять изделие по назначению и под контролем врача.**

## Инструкция по применению:

- петля надевается на 1-й палец кисти, оборачивается по тыльной стороне ладони и фиксируется на лучезапястном суставе
- размер и степень фиксации регулируются застежкой «Велкро»

**При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

**Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

## Рекомендации по уходу:

- стирать вручную при температуре не более 30° С, не использовать отбеливатель и химическую чистку, отжимать без выкручивания
- не гладить утюгом, не подвергать воздействию прямого солнечного света

**Состав:** неопрен - 65%, полиэстер - 35%.