

Виды неисправностей

Ситуация	Инспекционные процедуры	Возможные решения
Компрессор работает, но противопролежневый матрас не надувается.	1. Проверьте, является ли правильным напряжение питания? Неправильное напряжение может заставить компрессор функционировать неправильно и может его повредить.	1. Используйте мощный регулятор напряжения.
	2. Проверьте, нет ли сгибов на шланге?	2. Настройте положение шланга так, чтобы не было сгибов.
	3. Имеется ли утечка воздуха из шланга?	3. Замените шланг.
	4. Проверьте, надежно ли соединение шланга с компрессором?	4. Присоедините шланг к компрессору.
Компрессор не работает.	1. Проверьте шнур и электропитание.	1. Используйте мощный регулятор.
	2. Проверьте предохранитель.	2. Замените предохранитель.
Некоторые воздушные ячейки имеют ненормально низкое давление, в то время как в других ячейках давление в пределах нормы.	1. Позволяет ли шланг сглаживать воздушный поток? Сгибается ли он?	1. Настройте положение соединительного шланга так, чтобы не было сгибов.
	2. Имеется ли утечка воздуха из шланга?	2. Замените на новый соединительный шланг.
	3. Достаточно ли надежно зафиксирован соединительный шланг?	3. Обеспечьте надежное соединение.

Если ни одна из вышеупомянутых ситуаций не соответствует вашей проблеме, пожалуйста, обратитесь к продавцу для ее решения.

Уход при эксплуатации

Периодически (не реже 1 раза в месяц) необходимо мыть изделие: полимерные детали моются бытовыми моющими средствами, а металлические детали рекомендуется протирать раствором 0,5-1% хлорамина или теплой водой. Необходимо предохранять поверхность изделия от ударов твердыми или острыми предметами.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие матрасов требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Эта гарантия распространяется на все производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия.

Срок службы изделия – не менее 2 лет, при условии соблюдения правильной эксплуатации. Срок хранения – 3 года.

Гарантийный срок: - 12 месяцев со дня продажи на компрессор.

- 6 месяцев со дня продажи на матрас.

РУ № ФСЗ 2010/06586 от 13.04.2010 г.

Срок действия: не ограничен.

Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92; ГОСТ Р 50267.0.4-99; ГОСТ Р 50267.0-92; ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007; ГОСТ Р 50267.0.2-2005

Гарантийный талон

Название изделия	Противопролежневый матрас TRIVES
Модель	2500
Дата выпуска	-- МАР 2017
Дата покупки	
Пользователь	Имя:
	Адрес:
	Телефон:
Продавец	Имя:
	Телефон:
	Печать продавца:

ООО «Тривес»

Матрас противопролежневый TRIVES мод. 2500 (ячеистый) с компрессором

ПАСПОРТ



эффективный
бесшумный

ISO 13485:2003



Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес». Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.




При длительном постельном режиме риск образования пролежней резко возрастает. Для ухода за лежачими больными дома и в стационаре необходимы противопролежневые матрасы. Бесшумный компрессор создает необходимое давление в ячейках матраса в соответствии с весом человека, нормализует крово- и лимфообращение в сдавленных мягких тканях.


Противопролежневые матрасы TRIVES

- ✓ обеспечивают круглосуточный уход за лежачим больным
- ✓ осуществляют массаж мягких тканей, испытывающих сдавление
- ✓ улучшают кровообращение, нормализуют обмен веществ
- ✓ увеличивают площадь соприкосновения кожи с кроватью, уменьшая давление на каждый участок тела
- ✓ сглаживают неровности кровати
- ✓ помогают вернуться к активной жизни

Матрас противопролежневый TRIVES модель 2500 (ячеистый) разделен на ячейки, которые компрессор наполняет воздухом в шахматном порядке, образуя группы А и В, благодаря чему происходит изменение давления на тело пациента.

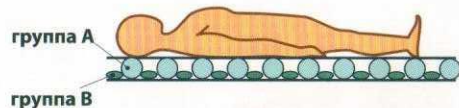

группа А наполнена воздухом, в это время группа В пуста

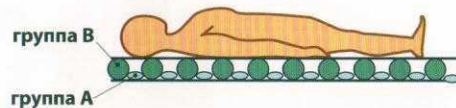

группа В наполнена воздухом, в это время группа А пуста

Применение

- ✓ Компрессор должен быть расположен на горизонтальной поверхности или подвешен за крючки у подножия кровати не ниже уровня матраса.
- ✓ Расположить матрас на кровати таким образом, чтобы соединительный шланг был в «ногах» пациента.
- ✓ Подогнуть края противопролежневого матраса (откидные створки) под обычный матрас.
- ✓ Соединить компрессор с матрасом, убедившись, что соединительный шланг не перекручен и не связан.
- ✓ Подсоедините компрессор к источнику питания, затем включите компрессор, индикатор включения должен загореться.
- ✓ Матрас приходит в рабочее состояние в течение 20-30 минут.
- ✓ Необходимо установить такое оптимальное давление, чтобы зазор между основанием наполненного матраса и пациентом был не менее 4 см.

Меры предосторожности

- использовать при температуре от 10°C до 35°C, влажности от 20% до 80%
- хранить при температуре от -15°C до 50°C, влажности от 10% до 90%

Технические характеристики

Матрас

- изготовлен из ПВХ (EN-71 не токсичный)
- состоит из 130 куполообразных, четырехугольных ячеек
- габариты матраса в рабочем состоянии 200x90x7 см
- гарантированный противопролежневый эффект при весе пациента до 130 кг
- снабжен откидными створками, размером по 40 см, для надежного крепления на кровати (подгибаются под стандартный матрас)
- цвет – бежевый
- вес – 2 кг

Компрессор (модель Aries Pump)

- бесшумный, непрерывной работы
- источник питания - 220-240В/50Гц
- производительность компрессора 6-7 л/мин
- диапазон давления - 35-130 мм рт.ст.
- время цикла – 6 мин
- потребляемая мощность – 10 Вт
- предохранитель – 1А
- электробезопасность – класс защиты II
- размер – 27x10x9 см
- вес – 1,1 кг

Комплектность

- матрас противопролежневый TRIVES модель 2500 – 1 шт.
- компрессор – 1 шт.
- соединительный шланг – 1 шт.
- ремонтный комплект (клей для склеивания ПВХ, материал ПВХ) – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.
- размер коробки 31x26x11 см

Противопоказания к применению

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- не использовать при скелетном вытяжении;
- нестабильные травмы позвоночника и спинного мозга.



Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

Эксплуатация

1. Расположение противопролежневого матраса:

Разместите противопролежневый матрас поверх стандартного матраса. Подверните откидные створки на обоих концах противопролежневого матраса под стандартный матрас. Ноги пациента должны быть помещены к стороне противопролежневого матраса с соединительным шлангом.

2. Осмотрите каждую воздушную ячейку и убедитесь, что каждая отдельная воздушная ячейка помещена горизонтально без сгибов.

3. Плотно подключите шланг к воздушным выходам на компрессоре и убедитесь, что отсутствуют разрывы. На шланге не должно быть перегибов.

4. Включите компрессор в сетевую розетку и поверните выключатель на панели дисплея компрессора. На выключателе загорится лампочка, что свидетельствует о работе прибора.

5. Выбор удобного уровня работы осуществляется путем поворота регулирующей ручки.

6. Компрессор запрограммирован на работу с циклом в 6 минут. В пределах каждого цикла сначала раздувается ячейка группы А, затем ячейки группы В. В начале следующего цикла ячейки группы А снова раздуваются первыми. Таким образом, каждая из ячеек А и В будет раздута в течение 3 минут последовательно.

Меры предосторожности

1. Не размещайте тяжелые предметы, например, стандартный матрас, поверх противопролежневого матраса.
2. Не царапайте противопролежневый матрас острыми предметами. Не курите, сидя или лежа на матрасе.
3. При чистке матраса и компрессора используйте только мягкие моющие средства (не содержащие растворителей). Не используйте для чистки высококонцентрированные моющие средства.
4. Не разбирайте компрессор для ремонта или видоизменения.
5. Перед использованием всегда накрывайте матрас чистой хлопчатобумажной простыней.
6. Не прыгайте на матрасе.
7. Никогда не используйте для чистки и сушки матраса стиральную машину.
8. Не размещайте вблизи матраса никаких нагревательных приборов.
9. Не бросайте компрессор.
10. Не допускайте попадания воды на компрессор.
11. К эксплуатации не допускаются лица, не ознакомленные с данным паспортом.