

## Сведения

Средство реабилитации для инвалидов: Ходунки XR 209, соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4717 от 08.09.2016г.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!**

Гарантийный срок на средство реабилитации для инвалидов: ходунки XR 209 – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части (накладки на поручни) гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Дата продажи \_\_\_\_\_

## Средство реабилитации инвалидов: Ходунки детские XR 209



## **Ходунки детские XR 209**

### **1. Назначение**

Ходунки двухколесные XR 209 предназначены для облегчения перемещения людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ходунки улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности.

### **2. Описание**

Ходунки изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава с мягкими накладками на поручни для рук. Задние ножки оснащены резиновыми наконечниками против скольжения. Передние ножки оснащены цельнолитыми колесами. Высота регулируется: 500-600 мм в 5 положениях.

### **3. Технические характеристики**

Общая ширина: 535 мм.

Общая длина: 410 мм.

Высота в сложенном виде: 500 мм.

Ширина в сложенном виде: 535 мм.

Длина в сложенном виде: 260 мм.

Расстояние между поручнями: 300 мм.

Диаметр колес: 65 мм.

Грузоподъемность: 50 кг.

Вес: 1,6 кг.

### **4. Комплект поставки**

1. Ходунки XR 209 – 1шт.

2. Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1шт.

### **5. Обслуживание и уход при эксплуатации**

Не допускать контакта изделия с нагревательными приборами. Запрещается проводить санитарную обработку изделия растворами на основе щелочей, растворителей, разбавителей, ацетонов и прочих растворов. Перед эксплуатацией надежно закрепить на унитаз.

3. Очищать влажной тканью с использованием мягких моющих средств.

### **7. Сведения о сертификации**

Ходунки XR 209 соответствуют требованиям технической документации, ГОСТ Р 51078-97, ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 и признаны годными к эксплуатации.

Декларация о соответствии № РОСС RU. 0002.04ИБРО действителен с 04.07.2016г. Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4717 от 08.09.2016 Срок действия: не ограничен.

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя!