



# ТРИВЕС



50 CM  
(ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ)

60 CM  
(ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ)

## T-8506

### БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (ТУТОР)

**T-8506 (50см)**

Бандаж на коленный сустав (тутор)



4 302866 064064

03.2018



03180031129900



# ТРИВЕС

## Бандаж компрессионный на коленный сустав БККС - «ТРИВЕС»

Модель: Т-8506

### Описание:

- изготовлен из многослойного мягкого нерастяжимого материала, внутренний слой – махровая ткань, обеспечивающая повышенный комфорт при длительном применении;
- состоит из 3 панелей для индивидуальной регулировки изделия по ноге;
- имеет 3 моделируемые шины по задней поверхности бандажа и 2 по боковым;
- выпускается длиной 50 см с 4 усиливающими лентами и 60 см с 6 усиливающими лентами;
- система из усиливающих лент с застежками «Велкро» обеспечивает надежную фиксацию бандажа на конечности.

### Функции:

- иммобилизация коленного сустава в функционально выгодном положении;
- боковая стабилизация коленного сустава.

### Показания к применению:

- острые травмы коленного сустава и надколенника;
- иммобилизация коленного сустава после оперативных вмешательств и гипсовой повязки;
- гемартроз;
- в качестве шины при транспортной иммобилизации;
- в качестве альтернативы гипсовой повязке по назначению врача.

### Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- необходимость индивидуального ортезирования сустава;
- злокачественные новообразования в области использования бандажа;
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней;
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие;
- тромбофлебит вен в области применения бандажа.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

### Инструкция по применению:

- одевается непосредственно на нижнюю конечность;
- расположение боковых шин и моделирование шин выполняется врачом;
- степень фиксации регулируется дополнительными лентами;
- режим, сроки ношения и степень фиксации определяются врачом.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

### Рекомендации по уходу:

- перед стиркой отстегнуть панели и вынуть шины из карманов;
- рекомендована ручная стирка при температуре 30° С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- после стирки тщательно прополоскать бандаж;
- не тереть и не выжимать изделие;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

### Состав:

- полиэстер – 60%, полиуретан – 20%, нейлон – 20%;
- шины: алюминий.



Дата выпуска Штамп ОТК	МАРТ 2018 ОТК			
Дата продажи Штамп торг. организации	УПАКОВЩИКЪЗ			