

Сведения

Средство реабилитации для инвалидов: Костыли подмышечные KS 501, соответствует техническим условиям и признаны годными для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4709 от 07.09.2016г.

Изготовитель: « Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко.,Лтд.»
Китай,
Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian
Development Zone,
Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Dali, Nanhai District,
528234 Foshan,
Guangdong, China

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Гарантийный срок на средство реабилитации для инвалидов: костыли KS 501L– 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части (накладки на поручни) гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Дата продажи _____

Средство реабилитации инвалидов: Костыли подмышечные 501 (L,M,S)



Костыли подмышечные KS 501 L

1. Назначение

Костыли подмышечные KS 501 L,M,S используются для улучшения координации движений и уменьшения нагрузки на ноги путем увеличения опоры и переноса массы тела на верхнюю часть туловища и руки.

2. Описание

Три типоразмера: L, M, S.

Костыли выполнены из высокопрочного алюминиевого сплава, подмышечные опоры и рукоятка изготовлены из вспененной резины.

Положение рукоятки регулируется в зависимости от потребностей пользователя.

3. Технические характеристики

Размер L:

Высота регулируется: 1355-1685 мм в 10 положениях.

Длина от подмышечной опоры до рукоятки: 410-560 мм в 5 положениях.

Длина опорной части: 200 мм.

Грузоподъемность: 120 кг.

Вес: 0,95 кг.

Размер M:

Высота регулируется: 1150-1380 мм в 10 положениях.

Длина от подмышечной опоры до рукоятки регулируется: 300-450 мм в 5 положениях.

Длина опорной части: 200 мм.

Грузоподъемность: 120 кг.

Вес: 0,88 кг.

Размер S:

Высота регулируется: 950-1180 мм в 10 положениях.

Длина от опоры до захвата: 160-310 мм в 5 положениях.

Длина опорной части: 200 мм.

Грузоподъемность: 120 кг.

Вес: 0,8 кг.

4. Комплект поставки

1. Костыли KS 501 – 1шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1шт.

5. Обслуживание и уход при эксплуатации

1. Не допускать контакта изделия с нагревательными приборами.

2. Запрещается проводить санитарную обработку изделия растворами на основе щелочей, растворителей, разбавителей, ацетонов и прочих растворов. Перед эксплуатацией надежно закрепить на унитаз.

3. Очищать влажной тканью с использованием мягких моющих средств.

Изготовитель: « Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко.,Лтд.»
Китай,

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian
Development Zone,
Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Dali, Nanhai District,
528234 Foshan,
Guangdong, China

7. Сведения о сертификации

Костыли KS 501 соответствуют требованиям технической документации, ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010 и признаны годными к эксплуатации.

Декларация о соответствии № РОСС RU. 0002.04ИБРО действителен с 04.07.2016г. Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4709 от 07.09.2016 Срок действия: не ограничен.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя!