


*До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!
Стойка для установки облучателя-рециркулятора*

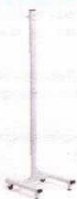

СПР-1

ВВЕДЕНИЕ

Стойка для установки облучателя-рециркулятора, модель: СПР-1 (далее по Руководству - стойка) предназначена для установки облучателя-рециркулятора однолампового.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользования или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Величина
Габариты (ДхГхВ) ($\pm 5\%$), мм	320x310x1100
Масса ($\pm 5\%$), кг	2,15

Стойка имеет металлический корпус с полимерно-порошковым покрытием.

Основание стойки оснащено 2 колесами и 2 стационарными опорами.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устанавливайте стойку на ровной горизонтальной поверхности;
- Не ставьте на стойку посторонние предметы;
- Перед каждым использованием проверяйте стойку на наличие механических повреждений, надежность крепления всех элементов.


ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

На основание поставьте штатив, совместив отверстия и развернув так, чтобы ручка смотрела в сторону колес (см. рис. ниже).

Вставьте болты с обратной стороны, подложив шайбу и закрепите гайкой (см. рис. ниже).

Для установки облучателя-рециркулятора в местах установленных болтов установите ответные части пластиковых креплений облучателя-рециркулятора и закрутите их болтом (см. рис. ниже).

Установите в крепления облучатель-рециркулятор.

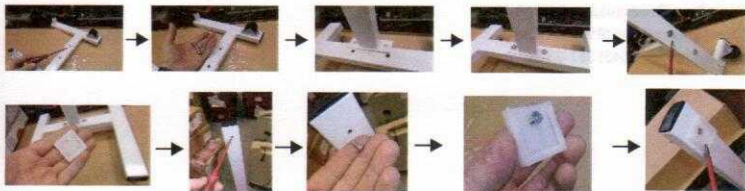

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Производите дезинфекцию стойки в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности стойки обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Стойку в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Стойку транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение стойку без упаковки завода-изготовителя не гарантирует ее сохранность. Повреждения стойки, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Стойка не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация стойки осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Штатив | 1 шт. |
| 2. Основание | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежа | 1 шт. |
| 4. Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции стойки, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Стойка для установки облучателя-рециркулятора, модель: СПР-1 соответствует нормативно-технической документации и признана годной для эксплуатации.

Срок службы - не менее 2 лет.

Гарантийный срок – 6 месяцев со дня отгрузки потребителю или со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 12 месяцев со дня изготовления.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.