



АРМЕД®
NON PROGREDI, EST REGREDI

Сиденье для ходунков D 47

т.м. "Armed"

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

ВВЕДЕНИЕ

Сиденье для ходунков D 47 т.м. "Armed" (далее по Руководству - сиденье) предназначено для установки на ходунки с целью обеспечения дополнительного комфорта.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед каждым использованием сиденья необходимо проверять устойчивость фиксации на ходунках.

Не превышайте допустимую нагрузку на сиденье.

Не прыгайте и не вставайте на сиденье во избежание его поломки.

Не вешайте на раму сиденья пакеты, сумки и другие предметы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Габариты (ДхШхВ) ($\pm 5\%$), мм	510x220x90
Габариты сиденья (ДхШ) ($\pm 5\%$), мм	410x220
Ширина между креплениями ($\pm 5\%$), мм	480
Диаметр крепления для рамы ($\pm 5\%$), мм	21
Допустимая нагрузка ($\pm 5\%$), кг	100
Масса ($\pm 5\%$), кг	0,9

ОПИСАНИЕ

Рама сиденья выполнена из металла с защитным покрытием.

Рама сиденья оснащена специальными креплениями, которые фиксируют его между боковыми ножками ходунков. Крепления имеют специальные нескользящие накладки.

Сиденье выполнено из пластика и имеет специальные отверстия, обеспечивающими оптимальный воздухообмен.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установите сиденье на раму ходунков, совместив фиксирующие элементы с рамой.

Надавите на фиксирующие элементы до щелчка, убедитесь, что каждое крепление надежно прикреплено.

Сиденье готово к эксплуатации.

ЧИСТКА

Производите дезинфекцию сиденья в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности сидения обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Сиденье в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Сиденье транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение сидения без упаковки завода-изготовителя не гарантирует его сохранность. Повреждения сиденья, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Сиденье не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация сиденья осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сиденье _____ 1 шт.

Руководство _____ 1 экз.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сиденье для ходунков D 47 т.м. "Armed" соответствует нормативно-технической документации и признано годным для эксплуатации.

Изготовитель: Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd.,

No.17, Danfeng West Road, Jintan City, Jiangsu Province, 213200, China

«Джиангсу Дэнгван Медикал Тритмент Инструмент Ко., Лтд.»

№17 Данфенг Вест Род, город Джинтан, провинция Джангсу, 213200, Китай

Срок службы - не менее 3 лет.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашивающиеся части гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.