

Трость трехопорная
TM 601



Инструкция по эксплуатации



Для безопасной и приятной эксплуатации компания Ortonica рекомендует подробно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

1. Назначение

Трость одноопорная Ortonica ТМ 601 предназначена для пользователей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Использование трости восстанавливает двигательную активность.

2. Показания к применению

- Нарушение функций опорно-двигательного аппарата;
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей;
- Умеренные и выраженные явления гемипареза.

2. Противопоказания

Перед применением рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом.

4. Эксплуатация

В разложенном виде трость трансформируется в стул (рис. 1). Для этого необходимо развести противоположные стороны сиденья и основу трости.



(рис. 1)



(рис. 2)

Трость оснащена нескользящими резиновыми насадками (рис. 2).

3. Меры предосторожности

- Будьте предельно осторожны при подъеме по ступенькам или эскалатору;
- Запрещается использовать костыли с открытым УПС на каменных и твердых поверхностях, а также в помещениях;
- С осторожностью перемещайтесь по мокрым и скользким поверхностям;
- Не используйте костыли при головокружении;
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, не акцентируя внимание на костылях.

5. Хранение и уход

Рекомендуем хранить костыли в сухом и чистом месте. Очищать раму и другие части изделия с помощью мягкой ткани с использованием мыльных моющих средств. После очистки, изделие просушить.

6. Технические характеристики

Параметры	ТМ 601
Высота, (± 1 см)	83
Грузоподъемность, кг	100
Масса (нетто/брутто), кг	0,85
Количество штук в упаковке	1

Дата продажи	Подпись и печать
	М.П.