

## **Зажимы: Mosquito**

**17-120                      10см**

Инструменты медицинские предназначены для использования в медицинской практике.

Нержавеющая сталь (коррозионно-стойкая сталь).

Производитель: Саммар Интернешенл, Пакистан, Sammar International, 2nd Floor Royal Medical Hall, Chowk Hazrat Imam Sahib, Sialkot, Pakistan.

[www.sammarsurgical.com](http://www.sammarsurgical.com)

Reg. № ФСЗ 2012/12514, ФСЗ 2012/12515,  
ФСЗ 2012/12516, ФСЗ 2012/12517.

### **Инструкция по эксплуатации**

Инструменты должны пройти стерилизационную обработку, состоящую из дезинфекции, предстерилизационной очистки и воздушной стерилизации.

Перед дезинфекцией инструменты должны быть тщательно отмыты от органических загрязнений.

1. Погрузить инструменты в дезинфицирующий моющий раствор, не вызывающий коррозию с нейтральным рН при температуре от + 25 °С в течение 15 - 60 мин., для чистки использовать неметаллические щетки или губки;
2. Ополаскивание чистой проточной водой в течение  $3 \pm 1$  мин. чтобы не остался дезраствор на инструментах;
3. Ополаскивание дистиллированной водой в течение  $0,5 \pm 0,1$  мин.;
4. Сушить горячим воздухом при температуре до 75 °С до полного исчезновения влаги;
5. Инструмент, который имеет коррозию, следует обязательно отделить от других инструментов.
6. Перед стерилизацией и хранением инструменты должны быть чистые, полностью высушены и в открытом виде.
7. Стерилизацию изделий проводить сухим горячим воздухом при температуре  $(170 \pm 10)$  °С в течение (50-60) мин.

\*Инструменты, имеющие съёмные и разборные детали, защитное покрытие, пружины, пластиковые и резиновые части, эмали - стерилизуются «холодным» методом: химическим, плазменным или радиационным.

**Хранение.** Инструменты хранить в сухом помещении при температуре от +5 °С до + 40 °С и относительной влажности воздуха не более 60%. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Гарантийный срок 1 год с момента отгрузки изделий потребителю при соблюдении инструкции по эксплуатации и хранению.